




beurer

BiteX Max BR 115




- CS** Přístroj na úlevu při bodnutí hmyzem
Návod k použití 3
- SK** Prístroj na liečenie uštipnutí hmyzom
Návod na použitie 32

CE 0483

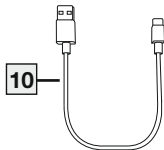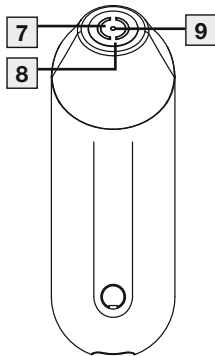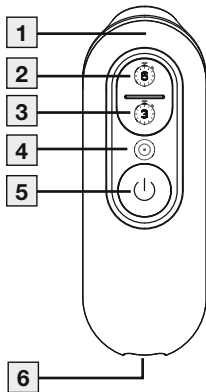

A

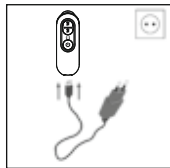

ČESKY



Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

OBSAH

1. Obsah balení	4	8. Čištění a údržba	23
2. Vysvětlení symbolů.....	4	9. Příslušenství a/nebo náhradní díly.....	24
3. Použití v souladu s určením.....	8	10. Co dělat v případě problémů?.....	24
4. Varovné a bezpečnostní pokyny....	10	11. Likvidace	27
5. Popis přístroje.....	18	12. Technické údaje.....	28
6. Uvedení do provozu	19	13. Záruka/servis.....	31
7. Použití.....	19		

1. OBSAH BALENÍ

Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, zda přístroj nevykazuje žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo na uvedenou adresu zákaznického servisu.

1x BiteX Max BR 115

1x nabíjecí kabel USB-C

1x návod k použití

2. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Na přístroji, v návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje jsou použity následující symboly:

VAROVÁNÍ

Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít ke smrti nebo závažným zraněním.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít k lehkým nebo drobným poraněním.



Informace o výrobku

Upozornění na důležité informace



Dodržujte návod

Před zahájením práce a/nebo obsluhy přístrojů nebo zařízení si přečtěte návod



Příložné části typu BF



(Elektrický) přístroj nesmí být likvidován spolu s domovním odpadem



Baterie s obsahem škodlivých látek nepatří do domovního odpadu.

	Výrobce
	Sériové číslo
	Přístroj je chráněn před vniknutím pevných cizích těles o průměru ≥ 1 mm a větších a před kapající vodou, pokud je kryt nakloněn až o 15° .
	Rozsah teplot
	Rozsah vlhkosti vzduchu
	Označení CE Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.
	Zdravotnický prostředek

	Produkt a součásti obalu roztrďte a zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
	Značka pro identifikaci obalového materiálu. A = zkratka materiálu, B = číslo materiálu: 1–7 = plasty, 20–22 = papír a lepenka
	Symbol dovozce
	Unique Device Identifier (UDI) Identifikátor pro jednoznačnou identifikaci výrobku
	Číslo výrobku
	Typové číslo
	Datum výroby

	Označení šarže
	Švýcarský zplnomocněný zástupce
	Stejnoseměrný proud
	Střídavý proud
	Polarita připojení stejnosměrného proudu
	Přístroj třídy ochrany II

3. POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Zamýšlené použití

Přístroj na úlevu při bodnutí hmyzem je určen ke zmírnění pocitů svědění a otoků po bodnutí nebo kousnutí hmyzem, a to vytvářením tepla (lokální hypertermie).

Cílová skupina

Přístroj na úlevu při bodnutí hmyzem je určen pro ošetření v domácích podmínkách, ne v profesionálních zdravotnických zařízeních. Přístroj na úlevu při bodnutí

hmyzem je vhodný pro použití u všech osob starších 3 let, zatímco samy mohou přístroj používat všechny osoby starší než 12 let.

Klinické použití

Ošetření a zmírnění pocitů svědění a otoků, které byly způsobeny bodnutím nebo kousnutím hmyzu.

Indikace

Ošetření přístrojem na úlevu při bodnutí hmyzem se doporučuje při:

- svědění
- otoku,

způsobeném kousnutím nebo bodnutím hmyzem.

4. VAROVNÉ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Kontraindikace

VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte přístroj, pokud máte cukrovku. Pociťování bolesti by mohlo být za určitých okolností omezené a diabetik by si mohl přivodit popáleniny.
- Nepoužívejte přístroj u bezmocných osob, dětí do 3 let nebo u osob se sníženou citlivostí na teplo. Do této kategorie patří osoby s onemocněním projevujícím se změnami na kůži nebo s jizvami na kůži v oblasti použití, osoby po požití utišujících léků, alkoholu nebo návykových látek.
- Nepoužívejte přístroj na kůži s akutním nebo chronickým onemocněním (poranění nebo zánět) (např. při bolestivých i nebolestivých zánětech, zarudnutí, vyrážce (např. alergie), na popáleninách, omrzlinách, pohmožděninách, otocích (bez známek po bodnutí/kousnutí hmyzem) a na otevřených nebo hojících se ranách, na hojících se operačních jizvách).
- Nepoužívejte přístroj, pokud máte horečku.
- Nepoužívejte přístroj na citlivé pokožce.

- Nepoužívejte přístroj v případě všech poruch senzibility se sníženým vnímáním bolesti (např. poruchy látkové výměny).
- Nepoužívejte přístroj při současné lokální aplikaci mastí, krému a gelů.
- Nepoužívejte přístroj při trvalém podráždění kůže z důvodu dlouhodobého působení tepla na stejném místě.

Obecná varovná upozornění

⚠ VAROVÁNÍ

- Při používání v soukromí musí být dotyčná osoba starší 12 let. Používání u dětí mladších 12 let je možné pouze za dozoru nebo pomoci dospělé osoby.
- Před použitím přístroje se obraťte na ošetřujícího lékaře v případě jakéhokoli kožního onemocnění, akutního onemocnění (zejména při sklonu k tromboembolickým onemocněním a rovněž v případě výskytu zhoubných nádorů), nevyjasněných chronických bolestí, nezávisle na části těla.
- Poradte se ihned s lékařem, pokud i přes používání přístroje pro léčbu bodnutí hmyzem vaše obtíže přetrvávají, a přerušete léčbu.

- Poradte se ihned s lékařem, pokud se potíže při používání přístroje pro léčbu bodnutí hmyzem nadále zhoršují, a přerušete léčbu.
- Poradte se ihned s lékařem, pokud se jedná o kousnutí klíštětem. Po kousnutí klíštětem hrozí riziko nákazy klíšťovou encefalitidou (FSME) nebo boreliózu.
- Poradte se ihned s lékařem, pokud se objeví první příznaky intenzivnějšího svědění, zarudnutí nebo otoku kůže, pokud pociťujete závratě, nevolnost, máte dýchací potíže, tvoří se pupínky nebo dochází k poklesu či nárůstu krevního tlaku.
- Nepoužívejte v blízkosti očí, na víčkách, rtech a sliznicích.
- Dbejte na to, aby si děti s přístrojem nehrály.
- Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Obalový materiál nenechávejte v dosahu dětí (nebezpečí udušení).
- Při používání přístroje pro léčbu bodnutí hmyzem dodržujte obecně platná hygienická opatření.
- Použití přístroje nenahrazuje lékařskou konzultaci a léčbu. Proto vždy nejdříve každý druh bolesti nebo nemoci konzultujte se svým lékařem.
- Přestane-li přístroj správně fungovat, dostaví-li se nevolnost nebo bolesti, okamžitě terapii přerušete.

Obecná bezpečnostní opatření

▲ UPOZORNĚNÍ

- Nedotýkejte se přístroje mokřýma rukama. Na přístroj nesmí stříkat voda. Přístroj můžete používat jen tehdy, pokud je úplně suchý.
- Při čištění a údržbě přístroje nepoužívejte žádné čisticí prostředky nebo rozpouštědla. Kapalina, která by do přístroje vnikla, by mohla poškodit elektroniku i další součásti přístroje a způsobit funkční poruchy.
- Přístroj může používat jen jedna osoba; nedoporučujeme, aby byl používán více osobami.
- Přístroj chraňte před přímým slunečním zářením a uchovávejte ho v suchém prostředí.
- Přístroj chraňte před nárazy, vlhkostí, prachem, chemikáliemi, silnými teplotními výkyvy a blízkými tepelnými zdroji (kamna, topná tělesa).
- Dbejte na to, aby se do přístroje nedostala žádná voda. Jestliže by se to stalo, použijte přístroj až tehdy, když bude úplně suchý.
- Po uložení přístroje nesmí být na něj pokládány těžké předměty.

- Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo na uvedenou adresu zákaznického servisu.
- Přístroj uložte na místě chráněném před povětrnostními vlivy. Přístroj je nutno uchovávat ve stanovených podmínkách prostředí.
- Během provozu nenechávejte přístroj bez dozoru. V případě chybné funkce přístroj vypněte a přerušte ošetřování.

Opatření pro zacházení s bateriemi

VAROVÁNÍ

- **Nebezpečí výbuchu! Nebezpečí požáru!** Nedodržení uvedených bodů může způsobit poranění osob, přehřátí, vytečení, odvětrání, zlomení, výbuch nebo požár.
- K nabíjení používejte vždy správný nebo přiložený nabíjecí kabel / nabíječku / síťový adaptér.
- Vyvarujte se trvalého nabíjení nebo přebíjení. Po nabití nabíječku odpojte.

- Pokud potřebujete síťový adaptér, musí splňovat platné bezpečnostní požadavky. Nesmí být překročena mez výkonu a maximální výkon uvedený na adaptéru. Doporučujeme použít adaptér uvedený v kapitole 12 technických údajů.
- Přístroj nabíjejte pod dohledem a věnujte pozornost vývoji tepla, deformaci a úniku plynů. V případě pochybností proces nabíjení přerušete.
- Vadné baterie / nabíjecí kabely / nabíječky již nepoužívejte a co nejdříve je řádně zlikvidujte (viz kapitola Likvidace).
- Přístroj ani baterie nevhazujte do ohně.
- Přístroj ani baterie nikdy násilně nevybíjejte, nezahřívejte, nerozebírejte, neotevírejte, nedrťte, nedeformujte, nekládejte do žádných obalů, neupravujte ani nevystavujte nárazům.
- Nikdy nezkratujte baterie a konektory přístroje napájeného z baterií.
- Chraňte přístroj nebo baterie před přímým slunečním zářením, deštěm, teplem a vodou.
- Pokud by byly baterie vystaveny extrémně vysokým teplotám nebo extrémně nízkému tlaku vzduchu, mohlo by to způsobit výbuch nebo únik hořlavých kapalin a plynů.

- Pokud by se tekutina z baterie dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima, opláchněte postižené místo vodou a vyhledejte lékaře.

UPOZORNĚNÍ

- Informace o odstraňování a/nebo výměně baterie naleznete na domovské stránce.

Poznámky k elektromagnetické kompatibilitě

⚠ VAROVÁNÍ

- Přístroj je vhodný pro použití ve všech prostředích, která jsou uvedena v tomto návodu k použití, včetně domácího prostředí.
- Přístroj lze při výskytu elektromagnetických poruchových veličin používat podle okolností jen v omezené míře. V důsledku toho se mohou například objevit chybová hlášení nebo může dojít k výpadku přístroje.
- Používání jiného příslušenství, než které určil nebo poskytl výrobce tohoto přístroje, může mít za následek zvýšené rušivé elektromagnetické záření nebo sníženou elektromagnetickou odolnost přístroje a způsobit chybnou funkci.

- Radiofrekvenční přístroje (včetně periférií jako anténních kabelů nebo externích antén) používejte minimálně ve vzdálenosti 30 cm od všech součástí tohoto přístroje, včetně všech kabelů dodávaných společně s přístrojem.
- Nepoužívejte přístroj v bezprostřední blízkosti jiných přístrojů nebo s přístroji naskládanými na sobě, neboť by mohlo dojít k chybné funkci. Pokud by však bylo použití ve výše uvedené podobě nutné, měli byste tento přístroj i ostatní přístroje sledovat a přesvědčit se, že pracují správně.
- Nerespektování těchto pokynů může způsobit omezení výkonu přístroje.

5. POPIS PŘÍSTROJE

Příslušné nákresy jsou zobrazeny na straně 3.

- | | |
|--|--|
| 1 Stavová kontrolka LED přístroje | 2 Aktivační tlačítko (6 sek. program) |
| 3 Aktivační tlačítko (3 sek. program) | 4 LED kontrolka pro indikaci zvolené velikosti topné destičky |
| 5 Vypínač napájení | 6 Přípojka USB-C |
| 7 Vnitřní topná destička | 8 Volitelně připojitelný, druhý topný kroužek |
| 9 BiteSpotLight (světlo) | 10 Nabíjecí USB kabel |

6. UVEDENÍ DO PROVOZU

Nabíjení přístroje **A**

1. Dodávaný nabíjecí kabel USB-C **10** zapojte do síťového adaptéru USB dle doporučení (output: max. 5 V/1 A, není součástí dodávky) a přístroje na úlevu při bodnutí hmyzem a přípojky USB-C **6**.
2. Síťový adaptér pak zapojte do vhodné zásuvky.
3. Během procesu nabíjení bliká přístrojová kontrolka LED **1** modře. Jakmile je přístroj plně nabitý, svítí přístrojová kontrolka LED **1** trvale modře.

7. POUŽITÍ

⚠ VAROVÁNÍ

Před každým použitím přístroje se ujistěte, že v místě bodnutí není žádné žihadlo. Před použitím přístroje opatrně odstraňte žihadlo. Použití bezprostředně po bodnutí nebo kousnutí hmyzem přináší nejlepší výsledky. Pokud budete s ošetřením místa bodnutí nebo kousnutí čekat příliš dlouho a objeví-li se svědění nebo

otok, má přístroj pro léčbu bodnutí hmyzem již jen omezený účinek. Přesto však postižené místo ošetřete přístrojem na úlevu při bodnutí hmyzem. Většinou dojde ke zmírnění pocitů svědění a léčba má rychlejší průběh.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Podle citlivosti uživatele a postiženého místa může teplota při ošetřování vyvolat nepříjemné pocity a způsobit lehké zarudnutí, v ojedinělých případech i podráždění kůže. Pokud byste při zahřívání pociťovali příliš velké teplo, ihned přerušte aplikaci!

1. Přístroj zapnete stisknutím vypínače na **5** 2 sekundy.
 - Přístrojová kontrolka LED **1** začne zeleně svítit. Přístroj je nyní připraven k provozu.
2. Můžete si vybrat ze dvou velikostí topných desek podle toho, jakou ošetřovanou plochu upřednostňujete.
 - Vnitřní topná destička **7** je přednastavena jako standardní velikost.
 - Vnitřní kontrolka LED indikující zvolenou velikost topné destičky **4** svítí.

- Pro obzvláště velkou ošetřovanou plochu můžete navíc ke standardní velikosti aktivovat jedním krátkým stisknutím vypínače **5** vnější topný kroužek **8**.
→ Rozsvítí se také vnější kontrolka LED, která signalizuje zvolenou velikost topné destičky **4**.
 - Každým dalším krátkým stisknutím vypínače **5** můžete přepínat mezi normální a velkou ošetřovanou plochou.
3. Přístroj s topnou destičkou **7** **8** umístěte na místo bodnutí nebo kousnutí.
4. Podle citlivosti kůže můžete zvolit 2 různé časy aplikace (3 nebo 6 sekund).



3sekundová doba aplikace se používá pro první použití nebo
Doporučeno k použití na citlivou pokožku.

- Pro 3sekundovou dobu aplikace stiskněte aktivační tlačítko **3** jednou **krátce**.
→ Přístrojová stavová LED **1** svítí oranžově, začne aplikace.
 - Pro 6sekundovou dobu aplikace stiskněte aktivační tlačítko **2** jednou **krátce**.
→ Přístrojová stavová LED **1** svítí růžově, začne aplikace.
5. Po uplynutí doby aplikace zazní akustický signál.

→ Přístrojová stavová LED **1** opět svítí zeleně, topná destička **7** **8** zastaví zahřívání.

6. Pro prodloužení životnosti baterie přístroj po každé aplikaci vypněte. Přístroj vypnete stisknutím vypínače na **5** 2 sekundy.



Pokud přístroj sami nevypnete, vypne se po 2 minutách automaticky pomocí automatického vypínače. Pro opětovné zapnutí přístroje stiskněte vypínač **5** znovu na 2 sekundy.

Upozornění na vybitou baterii

Pokud bude napětí baterie pro další aplikaci příliš nízké, stavová kontrolka LED **1** 3× blikne a 3× zazní akustický signál. Přístroj včas nabijte, jak je popsáno v kapitole 6.

8. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Dodržujte následující hygienické předpisy, abyste zabránili zdravotním problémům:

- Přístroj je určen k opětovnému používání.
- Doporučujeme očistit přístroj před prvním použitím i před každým dalším použitím.
- Před každým čištěním musí být přístroj vypnutý a vychladlý.
- K čištění používejte pouze jemné, suché utěrky.
- V žádném případě k čištění nepoužívejte látky, které by mohly být při kontaktu s kůží či sliznicemi potenciálně jedovaté. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky a nikdy přístroj neumývejte pod vodou.
- Přístroj neumývejte v myčce na nádobí!
- Neprovádějte mechanické čištění přístroje kartáčkem ani ničím podobným, protože by přitom mohly vzniknout neopravitelné škody.
- Při používání přístroje na několika místech bodnutí nebo kousnutí doporučujeme vždy očistit topnou destičku. Sniží se pravděpodobnost přenosu mikroorganismů a bakterií z jednoho místa na kůži na druhé. K dezinfekci topné destičky použijte vatovou tyčinku navlhčenou dezinfekčním prostředkem.

9. PŘÍSLUŠENSTVÍ A/NEBO NÁHRADNÍ DÍLY

Příslušenství a/nebo náhradní díly najdete na domovské stránce www.beurer.de v rubrice „Servis“. Uvedte příslušné objednací číslo.

Název	Číslo výrobku a/nebo objednací číslo
Síťový adaptér (EU)	072.78
Síťový adaptér (UK)	072.79

10. CO DĚLAT V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ?

Problém	Možná příčina	Odstranění problému
Přístroj se nezapíná.	Baterie přístroje je vybitá.	Nabijte baterii podle popisu v kapitole 6.
Přístroj se dostatečně nezahřívá.	Napětí baterie je příliš nízké.	Nabijte baterii podle popisu v kapitole 6.

Problém	Možná příčina	Odstranění problému
Zazní 3 akustické signály / přístrojová stavová kontrolka LED 1 bliká modře – i po opětovném vypnutí a zapnutí.	Napětí baterie je příliš nízké, takže se přístroj již nedá používat.	Nabijte baterii podle popisu v kapitole 6.
Přístroj se při každém spuštění aplikace vypne pomocí aktivacních tlačítek 2 3 a topná destička se nezahřeje.	Bylo aktivováno nouzové zastavení. Tlačítko aplikace 2 3 bylo stisknuto déle než 2 sekundy.	Pro opětovné zapnutí přístroje stiskněte vypínač 5 znovu na 2 sekundy. Pro spuštění aplikace stiskněte příslušné aktivacní tlačítko 2 3 jednou krátce.

Problém	Možná příčina	Odstranění problému
Přístroj se nezapíná, i když byl nabitý. Stavová kontrolka LED přístroje 1 nesvítí při nabíjení ani při zapnutí.	Přístroj je pravděpo- dobně vadný.	Kontaktujte nás prosím na zákaznický servis.
Zazní 5 akustických signálů a přístrojová stavová kontrolka LED 1 blikne 5× červeně.	Došlo zřejmě k chybě nějaké funkce.	Vypněte přístroj a opakujte aplikaci znovu zhruba za 10 minut. obraťte se na zákaznický servis, pokud se závada objeví znovu.

11. LIKVIDACE

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný obecní úřad, který má likvidaci na starost.



Likvidace baterie

- Použité, zcela vybité baterie se likvidují prostřednictvím speciálně označených sběrných nádob, ve sběrnách zvláštního odpadu nebo u prodejců elektrotechniky. Podle zákona jste povinni baterie likvidovat.
- Na bateriích s obsahem škodlivých látek se nacházejí tyto značky:
Pb = baterie obsahuje olovo,
Cd = baterie obsahuje kadmium,
Hg = baterie obsahuje rtuť.



12. TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	BR 110
Model	BR 115
Rozměry (d x š x v)	98,8 x 35,0 x 21,0 mm
Hmotnost	Přístroj: cca 40 g vč. nabíjecího kabelu: cca 50 g
Interní napájení	Dobíjecí lithium-polymerová baterie, 3,7 V, 600 mAh Nabíjení: 5V --- 1A; 5W
Externí napájení (Adaptér není součástí balení)	Příkon: 100–240 V $\sim$, 50–60 Hz Výstupní výkon: 5 V --- , 1 A
Max. Teplota	50 °C $\pm$ 2 °C (122 °F $\pm$ 3,6 °F)
Funkce	2 časové stupně (3 s / 6 s) 2 velikosti topných destiček (normální (7 mm) / velká (14 mm))

Předpokládaná doba provozu	cca 500 použití (na jedno nabití akumulátoru)
Přípustná teplota a vlhkost vzduchu při přepravě a skladování	-20 °C až 55 °C, Relativní vlhkost vzduchu 0 % až 90 %
Přípustná provozní teplota a vlhkost vzduchu	5 °C až 40 °C, relativní vlhkost vzduchu 15 % až 90 %, 700 –1060 hPa vnější tlak
Automatické vypnutí přístroje	2 min po poslední aplikaci

Sériové číslo se nachází na přístroji nebo v přihrádce na baterie.
Technické změny vyhrazeny.

Tento přístroj odpovídá evropské normě EN 60601-1-2 (skupina 1, třída B, ve shodě s CISPR 11, CISPR 14-1, CISPR-32, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11) a podléhá speciálním bezpečnostním opatřením z hlediska elektromagnetické kompatibility.

Síťový adaptér

Model č.	LXCP12X-050100BG
Příkon	100–240 V  , 50–60 Hz, max. 0,5 A
Výstupní výkon	5 V  , 1 A, blikne 5× červeně Beurer
Výrobce	Shenzhen longxc Power Supply Co., Ltd.
Ochrana	Přístroj má dvojitou ochranu a odpojovač na primární straně, který přístroj při poruše odpojí od sítě. Před použitím síťového adaptéru se ujistěte, že je přístroj správně umístěn v nabíječce a že je do přístroje vložen akumulátor.
	Polarita přípojky stejnosměrného napětí
	Izolace/třída ochrany 2
Pouzdro a ochranné kryty	Kryt síťového adaptéru chrání uživatele před kontaktem s (možnými) částmi pod napětím (např. prsty, jehlou nebo zkušebním háčkem). Uživatel se nesmí současně dotýkat pacienta a výstupní zástrčky síťového adaptéru AC/DC.

13. ZÁRUKA/SERVIS

Více informací o záruce a záručních podmínkách naleznete v přiloženém záručním listu.

Upozornění na hlášení incidentů

Pro uživatele/pacienty v Evropské unii a identických regulačních systémech platí: Pokud by během používání výrobku nebo základě jeho používání došlo k nějaké závažné události, oznamte to výrobcí a/nebo jeho zplnomocněnému zástupci a příslušnému vnitrostátnímu orgánu členského státu, ve kterém se uživatel/pacient nachází.

SLOVENSKY



Starostlivo si prečítajte tento návod na použitie, uschovajte ho na neskoršie použitie, sprístupnite ho aj iným používateľom a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené.

OBSAH

1. Obsah balenia	33	8. Čistenie a starostlivosť	52
2. Vysvetlenie symbolov	33	9. Príslušenstvo a/alebo	
3. Účel použitia.....	38	náhradné diely	53
4. Výstražné a bezpečnostné		10. Čo robiť, ak sa vyskytnú	
upozornenia.....	39	problémy?.....	54
5. Popis prístroja.....	47	11. Likvidácia.....	56
6. Uvedenie do prevádzky.....	48	12. Technické údaje.....	57
7. Použitie.....	49	13. Záruka/servis.....	60

1. OBSAH BALENIA

Skontrolujte obsah balenia a overte, či kartónový obal nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že prístroj nevykazuje žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.

1x BiteX Max BR 115

1x USB-C nabíjací kábel

1x návod na obsluhu

2. VYSVETLENIE SYMBOLOV

Na zariadení, v návode na obsluhu, na obale a na typovom štítku zariadenia sa používajú nasledovné symboly:

⚠ VAROVANIE

Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť smrť alebo najťažšie zranenia.

⚠ POZOR

Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť ľahké alebo drobné poranenia.



Informácia o produkte

Upozornenie na dôležité informácie



Dodržiavajte návod

Pred začiatkom práce a/alebo obsluhou prístrojov alebo strojov si prečítajte návod



Aplikačné časti typ BF

	(Elektrický) prístroj sa nesmie likvidovať s komunálnym odpadom
	Batérie s obsahom škodlivých látok nelikvidujte v komunálnom odpade
	Výrobca
	Sériové číslo
	Prístroj chránený pred pevnými cudzími telesami s priemerom ≥ 1 mm a väčším a pred kvapkajúcou vodou, keď je kryt naklonený max. 15°
	Rozsah teplôt
	Rozsah vlhkosti

	Značka CE Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem.
	Zdravotnícka pomôcka
	Oddelte výrobok a obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.
	Označenie na identifikáciu obalového materiálu. A = skratka materiálu, B = číslo materiálu: 1–7 = plasty, 20–22 = papier a kartón
	Symbol importéra
	Unique Device Identifier (UDI) Identifikátor na jednoznačnú identifikáciu produktu
	Číslo výrobku

	Typové číslo
	Dátum výroby
	Označenie šarže
	Spĺnomocnenec pre Švajčiarsko
	Jednosmerný prúd
	Striedavý prúd
	Polarita prípojky jednosmerného prúdu
	Prístroj triedy ochrany II

3. ÚČEL POUŽITIA

Určené použitie

Prístroj na liečenie uštipnutí hmyzom je určený na zmiernenie svrbenia a opuchov spôsobených uštipnutím alebo uhryznutím hmyzom pomocou tepla (lokálnej hypotermie).

Cieľová skupina

Prístroj na liečenie uštipnutí hmyzom je určený na lekárske ošetrovanie v domácom prostredí, nie v profesionálnych zariadeniach na prevenciu zdravotnej starostlivosti. Použitie prístroja na liečenie uštipnutí hmyzom je vhodné pre všetky osoby od 3 rokov pod dozorom, zatiaľ čo vlastné použitie je možné pre všetky osoby od 12 rokov.

Klinické využitie

Klinické použitie Ošetrovanie a zmierňovanie svrbenia a opuchu, ktoré boli spôsobené uštipnutím alebo uhryznutím hmyzom.

Indikácia

Ošetrovanie prístrojom na liečenie uštipnutí hmyzom sa odporúča pri:

- svrbení,
 - opuchu,
- spôsobenými uhryznutím hmyzom alebo uštipnutím.

4. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Kontraindikácie

VAROVANIE

- Prístroj nepoužívajte, ak trpíte cukrovkou. Eventuálne by mohlo byť znížené pociťovanie bolesti a diabetici by si mohli sami spôsobiť popáleniny.
- Prístroj nepoužívajte na bezmocných osobách, deťoch do 3 rokov alebo osobách s obmedzenou citlivosťou na teplo. Tým sa rozumejú osoby s chorobnými zmenami kože alebo zjazvenými časťami kože v oblasti aplikácie, po užití liekov tlmiacich bolesť alebo alkoholu alebo drog.

- Prístroj nepoužívajte na pokožke s akútnym alebo chronickým ochorením (poškodenie alebo zápal) (napr. pri bolestivých alebo bezbolestných zápaloch, sčervenaniach, vyrážkach (napr. alergie), popáleninách, omrzlinách, pomliaždeninách, opuchoch (bez známk po uštipnutí /uhryznutí hmyzom) a otvorených alebo hojajúcich sa ranách a pooperačných jazvách, ktoré sú súčasťou procesu hojenia).
- Prístroj nepoužívajte, ak máte teplotu.
- Prístroj nepoužívajte na citlivých oblastiach kože.
- Prístroj nepoužívajte v prípade akýchkoľvek porúch citlivosti so znížením vnímaním bolesti (ako napr. poruchy látkovej výmeny).
- Prístroj nepoužívajte súčasne s lokálnou aplikáciou masť, krémov a gélov.
- Prístroj nepoužívajte pri neustálom podráždení kože na základe dlhodobého pôsobenia tepla na rovnakom mieste na pokožke.

Všeobecné výstražné upozornenia

⚠ VAROVANIE

- Pri samoaplikácii musí byť osoba staršia ako 12 rokov. Použitie u detí do 12 rokov by sa malo uskutočňovať len pod dohľadom alebo s pomocou dospelaj osoby.
- Pred použitím prístroja sa poraďte so svojím ošetrojúcim lekárom v prípade všetkých kožných ochorení, akútnych ochorení (zvlášť pri náchylnosti na tromboembolické choroby, ako aj v prípade zhubných nádorov), nevyjasnených chronických bolestivých stavov nezávisle od časti tela.
- Poraďte sa s lekárom, ak napriek použitiu prístroja na liečenie uštipnutí hmyzom ťažkosti pretrvávajú a prístroj prestaňte používať.
- Poraďte sa s lekárom, ak sa počas použitia prístroja na liečenie uštipnutí hmyzom alebo po ňom ťažkosti zhoršia a prístroj prestaňte používať.
- Poraďte sa s lekárom, ak ide o uhryznutie kliešťom. Uštipnutie môže viesť k prenosu choroboplodných zárodkov, ako napr. kliešťovej meningoencefalitídy alebo boreliózy.

- Poradte sa s lekárom, ak sa vyskytnú prvé príznaky silnejšieho svrbenia, sčervenania, opuchu, závratu, nevoľnosti, dýchavičnosti, tvorby vyrážok, poklesu alebo zvýšenia tlaku krvi.
- Nepoužívajte v blízkosti očí, na viečkach, v ústach a na slizniciach.
- Dbajte na to, aby deti nepoužívali prístroj ako hračku.
- Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Obal uchovávajte mimo dosahu detí (nebezpečenstvo udusenía).
- Pri použití prístroja na liečenie uštipnutí hmyzom dodržiavajte všeobecné hygienické opatrenia.
- Použitie prístroja nenahrádza konzultáciu s lekárom a liečbu. Preto sa v prípade akejkoľvek bolesti alebo ochorenia spýtajte svojho lekára.
- Ak by prístroj nefungoval správne alebo by spôsoboval nevoľnosť alebo bolesti, okamžite prerušte jeho používanie.

Všeobecné bezpečnostné opatrenia

⚠ POZOR

- Prístroj nechytajte vlhkými rukami. Na prístroj nesmie striekať voda. Prístroj sa smie používať iba úplne suchý.
- Na čistenie a údržbu prístroja nepoužívajte pracie prostriedky ani rozpúšťadlá. Vniknutá kvapalina môže spôsobiť poškodenie elektroniky a ďalších častí prístroja a spôsobiť poruchu funkcie.
- Prístroj smie používať iba jedna osoba, neodporúčame použitie viacerými osobami.
- Prístroj chráňte pred priamym slnečným žiarením a skladujte ho v suchu.
- Chráňte prístroj pred nárazmi, vlhkosťou, prachom, chemikáliami, veľkými teplotnými výkyvmi a neskladujte ho blízko tepelných zdrojov (pece, vykurovacie telesá).
- Dbajte na to, aby sa do vnútra prístroja nedostala žiadna voda. Ak do prístroja vnikla voda, nepoužívajte ho, kým kompletne nevyschne.
- Ak prístroj skladujete, nekladte naňho ťažké predmety.

- Pred použitím prístroja je potrebné sa uistiť, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.
- Prístroj uchovávajte na mieste, ktoré je chránené pred poveternostnými vplyvmi. Prístroj sa musí uchovávať v stanovených okolitých podmienkach.
- Počas aplikácie prístroj nikdy nenechávajte bez dohľadu. Ak prístroj nefunguje správne, vypnite ho a prestaňte s používaním.

Opatrenia týkajúce sa manipulácie s batériami

VAROVANIE

- **Nebezpečenstvo výbuchu! Nebezpečenstvo požiaru!** Nedodržanie uvedených bodov môže mať za následok zranenia osôb, prehriatie, vytečenie, odvetranie, prasknutie, výbuch alebo požiar.
- Na nabíjanie vždy používajte správny alebo dodaný nabíjací kábel/nabíjačku/napájací zdroj.
- Vyhnite sa trvalému nabíjaniu alebo prebíjaniu. Po nabití vytiahnite zástrčku nabíjačky.

- Ak potrebujete sieťový adaptér, musí spĺňať platné bezpečnostné požiadavky. Nesmie sa prekročiť výkonová hranica a maximálny výkon uvedený na adaptéri. Odporúčame používať adaptér uvedený v kapitole 12 technických údajov.
- Zariadenie nabíjajte pod dohľadom a dávajte pozor na tvorbu tepla, deformácie a odplyňovanie. V prípade pochybností proces nabíjania prerušte.
- Chybné batérie/nabíjací kábel/nabíjačku už nepoužívajte a čo najskôr ich odborne zlikvidujte (pozri kapitolu Likvidácia).
- Nevyhadzujte zariadenie ani batérie do ohňa.
- Zariadenia alebo batérie nikdy nevybíjajte násilím, nezohrievajte, nerozoberajte, neotvárajte, nedrvte, nedeformujte, nezapuzdrujte, neupravujte ani nevystavujte nárazom.
- Nikdy neskratujte batérie a konektory zariadenia napájaného z batérie.
- Chráňte výrobok alebo batérie pred priamym slnečným žiarením, dažďom, veľkým teplom a vodou.
- Keď sa batérie vystavujú prostrediu s extrémne vysokými teplotami alebo extrémne nízkym tlakom vzduchu, môže to viesť k výbuchu alebo vytečeniu horľavých kvapalín a plynov.

- Ak dôjde ku kontaktu tekutiny z batérie s pokožkou alebo očami, postihnuté miesto vymyte vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

UPOZORNENIE

- Informácie o vybratí a/alebo výmene batérie nájdete na domovskej stránke.

Oznámenie o elektromagnetickej kompatibilite

⚠ VAROVANIE

- Prístroj je navrhnutý tak, aby mohol byť prevádzkovaný vo všetkých prostrediach uvedených v tomto návode na obsluhu, vrátane domáceho prostredia.
- V prítomnosti elektromagnetického rušenia môže byť prístroj za určitých okolností používaný iba v obmedzenej miere. V dôsledku toho sa môžu vyskytnúť, napr. chybové hlásenia alebo porucha prístroja.
- Použitím iného príslušenstva ako toho, ktoré stanovil alebo zabezpečil výrobca tohto prístroja, môže mať za následok zvýšené rušivé elektromagnetické vyžarovanie alebo zníženú elektromagnetickú odolnosť zariadenia a môže viesť k chybnému spôsobu prevádzky.

- Prenosné RF komunikačné zariadenia (vrátane periférnych zariadení, ako sú anténne káble alebo externé antény) musia byť vzdialené aspoň 30 cm od všetkých častí prístroja, vrátane káblov, ktoré sú súčasťou balenia.
- Treba sa vyhnúť tomu, aby sa tento prístroj používal bezprostredne vedľa iných prístrojov alebo s ďalšími prístrojmi na sebe, pretože to môže mať za následok chybný spôsob prevádzky. Ak je napriek tomu potrebné používať ho popísaným spôsobom, tento prístroj a ďalšie prístroje je nutné sledovať, aby ste sa presvedčili, že fungujú správne.
- Nedodržanie tohto pokynu môže mať za následok zníženie výkonu prístroja.

5. POPIS PRÍSTROJA

Príslušné nákresy sú zobrazené na strane 3.

1 Stavová LED prístroja

3 Aktivačné tlačidlo
(3 s program)

2 Aktivačné tlačidlo
(6 s program)

4 LED na zobrazenie zvolenej
veľkosti vyhrievacej platničky

- 5** Tlačidlo zapnutia/vypnutia
- 7** Vnútna vyhrievacia platnička
- 9** BiteSpotLight (svetlo)

- 6** USB-C prípojka
- 8** Voliteľne zapínateľný druhý vyhrievací krúžok
- 10** USB-C nabíjací kábel

6. UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Nabitie prístroja **A**

1. Spojte dodaný USB-C nabíjací kábel **10** s USB sieťovým adaptérom podľa odporúčania (output: max. 5 V/1 A, nie je súčasťou balenia) a prístrojom na liečenie uštipnutí hmyzom na USB-C prípojke **6**.
2. Následne zasunúť sieťový adaptér do vhodnej zásuvky.
3. Počas nabíjania bliká stavová LED prístroja **1** namodro. Keď je prístroj úplne nabitý, stavová LED prístroja svieti **1** nepretržite namodro.

7. POUŽITIE

VAROVANIE

Pred každým použitím dbajte o to, aby sa v mieste vpichu už nenachádzalo žihadlo hmyzu. Žihadlo pred použitím odstráňte. Použitie bezprostredne po uštipnutí alebo uhryznutí hmyzom prináša najlepšie výsledky. Ak budete príliš dlho čakať s ošetrením miesta uštipnutia alebo uhryznutia a už nastalo svrbenie a opuch, môže prístroj na liečenie uštipnutí hmyzom pôsobiť len obmedzene. Miesto predsa ošetríte prístrojom na liečenie uštipnutí hmyzom. Väčšinou sa svrbenie zmierni a liečenie sa zrýchli.

POZOR

V závislosti od citlivosti používajúcej osoby a miesta na koži môže byť teplota ošetrovania pociťovaná ako nepríjemná a vyvolať mierne sčervenanie kože, v zriedkavých prípadoch aj podráždenie kože. Ak by ste teplo pociťovali ako príliš horúce, ihneď zastavte ošetrovanie!

1. Na zapnutie prístroja podržte tlačidlo ZAP/VYP stlačené  2 sekundy.

- Stavová LED prístroja **1** začne svietiť nazeleno. Prístroj je teraz pripravený na prevádzku.
2. Môžete si vybrať z dvoch veľkostí vyhrievacích platničiek, podľa toho, ktorú ošetrovanú plochu uprednostňujete.
- Vnútná vyhrievacia platnička **7** je prednastavená ako štandardná veľkosť.
→ Vnútná LED na zobrazenie zvolenej veľkosti vyhrievacej platničky **4** svieti.
 - Na mimoriadne veľkú ošetrovanú plochu môžete okrem štandardnej veľkosti aktivovať jedným krátkym stlačením tlačidla ZAP/VYP **5** vonkajší vyhrievací krúžok **8**.
→ Rozsvieti sa aj vonkajšia LED na zobrazenie zvolenej veľkosti vyhrievacej platničky **4**.
 - Každým ďalším krátkym stlačením tlačidla ZAP/VYP **5** môžete prepínať medzi normálnou a veľkou ošetrovanou plochou.
3. Umiestnite prístroj vyhrievacou platničkou **7** **8** na miesto uštipnutia alebo uhryznutia.

4. Môžete si vybrať medzi 2 rôznymi časmi aplikácie (3 alebo 6 sekúnd), v závislosti od citlivosti pokožky.



3-sekundový čas aplikácie sa odporúča pri prvom použití alebo použití na citlivej pokožke.

- Na 3-sekundovú aplikáciu aktivačné tlačidlo **3** raz **krátko** stlačte.
→ Stavová LED prístroja **1** svieti naoranžovo, použitie začína.
 - Na 6-sekundovú aplikáciu aktivačné tlačidlo **2** raz **krátko** stlačte.
→ Stavová LED prístroja **1** svieti naružovo, použitie začína.
5. Po uplynutí času aplikácie zaznie akustický signál.
→ Stavová LED prístroja **1** opäť svieti nazeleno, vyhrievacia doštička **7** **8** prestane vyhrievať.
6. Na predĺženie životnosti batérie prístroj po každom použití vypnite. Na vypnutie prístroja podržte tlačidlo ZAP/VYP **5** 2 sekundy stlačené.



Ak prístroj aktívne nevypnete, automaticky sa vypne po 2 minútach automatickým vypnutím. Na opätovné zapnutie prístroja podržte tlačidlo ZAP/VYP **5** opäť stlačené 2 sekundy.

Výstraha batérií

Skôr ako bude napätie batérií príliš nízke na ďalšie použitie, zabliká stavová LED prístroja **1** 3x a zaznie 3x akustický signál. Prístroj včas nabite, ako je popísané v kapitole 6.

8. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

Dodržiujte nasledovné hygienické predpisy, aby ste predišli ohrozeniu zdravia:

- Prístroj je určený na viacnásobné použitie.
- Odporúčame, aby ste prístroj pred prvým použitím a po každom ďalšom použití vyčistili.
- Pred každým čistením sa prístroj musí vypnúť a nechať vychladnúť.
- Na čistenie telesa používajte výlučne mäkké, suché utierky.

- Na čistenie nepoužívajte v žiadnom prípade látky, ktoré môžu byť pri kontakte s pokožkou alebo sliznicami potenciálne jedovaté. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky a prístroj nikdy neponárajte do vody.
- Prístroj neumývajte v umývačke riadu!
- Prístroj sa nesmie mechanicky čistiť kefou alebo podobne, pretože následkom môžu byť neopraviteľné poškodenia prístroja.
- Pri použití prístroja na viacerých miestach pichnutia alebo uhryznutia odporúčame vyhrievaciu platničku zakaždým vyčistiť. Tak sa zmenší možnosť, že sa zárodky a baktérie prenesú z jedného miesta na koži na druhé. Na dezinfekciu vyhrievacej platničky použite vatovú tyčinku navlhčenú v dezinfekčnom prostriedku.

9. PRÍSLUŠENSTVO A/ALEBO NÁHRADNÉ DIELY

Príslušenstvo a/alebo náhradné diely sú k dispozícii na domovskej stránke www.beurer.de v časti „Service“. Zadať príslušné objednávacie číslo.

Označenie	Výrobné, resp. objednávacie číslo
Sieťový adaptér (EÚ)	072.78

Označenie	Výrobné, resp. objednávacie číslo
Sieťový adaptér (UK)	072.79

10. ČO ROBIŤ, AK SA VYSKYTNÚ PROBLÉMY?

Problém	Možná příčina	Odstránenie
Prístroj sa nezapína.	Akumulátor prístroja je vybitý.	Prístroj nabíjajte tak, ako je popísané v kapitole 6.
Prístroj sa už dostatočne nezahrieva.	Napätie akumulátora je príliš nízke.	Prístroj nabíjajte tak, ako je popísané v kapitole 6.
Prístroj vydá 3 zvukové signály a stavová LED prístroja 1 3-krát zabliká po opätovnom vypnutí a zapnutí.	Napätie akumulátora je príliš nízke, takže sa už prístroj nemôže používať.	Prístroj nabíjajte tak, ako je popísané v kapitole 6.

Problém	Možná příčina	Odstránenie
Prístroj sa pri každom spustení použitia vypne pomocou aktivačných tlačidiel 2 3 a vyhrievacia platnička sa nezahrieva.	Bolo aktivované núdzové vypnutie. Tlačidlo použitia 2 3 bolo stlačené dlhšie ako 2 sekundy.	Na opätovné zapnutie prístroja podržte tlačidlo ZAP/VYP 5 opäť stlačené 2 sekundy. Na spustenie použitia príslušné aktivačné tlačidlo 2 3 raz krátko stlačte.
Prístroj sa nezapne, hoci bol nabitý. Stavová LED prístroja 1 nesvieti počas nabíjania ani pri zapnutí.	Prístroj je možno chybný.	Obráťte sa na zákaznícky servis.

Problém	Možná příčina	Odstránenie
Prístroj vydá 5 zvukových signálov a stavová LED prístroja 1 zabliká 5-krát.	Pravdepodobne ide o chybnú funkciu.	Prístroj vypnite a aplikáciu zopakujte znovu po 10 min. Ak sa chyba vyskytne opakovane, obráťte sa na zákaznícky servis.

11. LIKVIDÁCIA

V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po skončení svojej životnosti nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberných miest vo vašej krajine. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.



Likvidácia akumulátorov

- Spotrebované, úplne vybité akumulátory je potrebné likvidovať vloženíím do špeciálne označených zberných nádob, odovzdaním na zberných miestach alebo v obchodoch s elektronikou. Zo zákona ste povinný akumulátory zlikvidovať.
- Na akumulátoroch obsahujúcich škodlivé látky nájdete tieto značky:
Pb = batéria obsahuje olovo,
Cd = batéria obsahuje kadmium,
Hg = batéria obsahuje ortuť.



12. TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	BR 110
Model	BR 115
Rozmery (D x Š x V)	98,8 x 35,0 x 21,0 mm
Hmotnosť	Prístroj: cca 40 g vrátane nabíjacieho kábla: cca 50 g

Interné napájanie	nabíjateľná lítiovo-polymérová batéria, 3,7 V, 600 mAh Nabíjanie: 5 V --- 1 A; 5 W
Externé napájanie (Adaptér nie je súčasťou balenia)	Vstupný výkon: 100 – 240 V $\sim$, 50 – 60 Hz Výstupný výkon: 5 V --- , 1 A
Max. teplota	50 °C $\pm$ 2 °C (122 °F $\pm$ 3,6 °F)
Funkcie	2 časové stupne (3 s/6 s) 2 veľkosti vyhrievacích platničiek (normálna (7 mm)/veľká (14 mm))
Predpokladaná doba prevádzky	cca 500 použití (na jedno nabitie akumulátora)
Prípustná teplota a vlhkosť vzduchu počas skladovania a prepravy	–20 °C až 55 °C Relatívna vlhkosť vzduchu 0 % až 90 %
Prípustná prevádzková teplota a vlhkosť vzduchu	5 °C až 40 °C, relatívna vlhkosť vzduchu 15 % až 90 %, 700 – 1060 hPa okolitý tlak
Automatické vypnutie zariadenia	2 min. po poslednom použití

Sériové číslo sa nachádza na prístroji alebo v priehradke na batérie.
Technické zmeny vyhradené.

Prístroj zodpovedá európskej norme EN 60601-1-2 (skupina1, trieda B, zhoda s CISPR 11, CISPR 14-1, CISPR-32, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11) a podlieha osobitným opatreniam s ohľadom na elektromagnetickú kompatibilitu.

Sieťový zdroj

Č. modelu	LXCP12X-050100BG
Vstupný výkon	100 – 240 V  , 50 – 60 Hz, max. 0,5 A
Výstupný výkon	5 V  , 1 A, iba s prístrojom Beurer
Výrobca	Shenzhen longxc Power Supply Co., Ltd.

Ochrana	Prístroj je vybavený dvojitou ochranou a primárnym odpojovačom, ktorý prístroj v prípade poruchy odpojí od siete. Pred použitím sieťového zdroja sa uistite, že je prístroj správne umiestnený v nabíjacej základni a že je v prístroji zabudovaný akumulátor.
	Polarita prípojky jednosmerného napätia
	Izolovaný/trieda ochrany 2
Kryt a ochranné kryty	Kryt napájacieho zdroja chráni používateľa pred kontaktom s časťami pod napätím (napr. prstami, ihlou alebo testovacím háčikom). Používateľ sa nesmie súčasne dotýkať pacienta a koncovkej zástrčky sieťového adaptéra AC/DC.

13. ZÁRUKA/SERVIS

Bližšie informácie o záruke a záručných podmienkach nájdete v priloženom záručnom liste.

Upozornenie k hláseniu udalostí

Pre používateľov/pacientov v Európskej únii a identických regulačných systémoch platí: Ak by sa počas používania alebo na základe používania produktu stal incident, ohláste to výrobcovi a/alebo jeho splnomocnenej osobe, ako aj príslušnému národnému úradu členského štátu, v ktorom sa používateľ/pacient nachádza.



Beurer GmbH, Söflinger Str. 218
89077 Ulm, Germany, www.beurer.com



610.21_BR115_2025-11-24_01_IM2_BEU_MDR_CS-SK