

Vážený zákazníku, blahopřejeme vám k vašemu výběru! Kvalitní zpracování, malé rozměry, přesnost měření a nízká cena jsou hlavními přednostmi tohoto přístroje.

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ:

	0,000‰ < ROZSAH > 4,000‰
	PŘESNOST <-0,06‰> +0,06‰ 0,44‰ 0,50‰ 0,56‰
	Další funkce: • podsvícení náustku • paměť posledního měření • upozornění na nutnost kalibrace • ochrana proti nespolehlivému měření

UPOZORNĚNÍ! NEŽ ZAČNETE MĚŘIT!

Po požití alkoholu si vypláchněte ústa a počkejte 30 minut. To je doba potřebná k tomu, aby se alkohol vstřebal do krve a jeho výpary v ústech a slinách se snížily. Pro správné měření nejméně 30 minut před měřením nejezte, nepijte a nekuřte. Neprovádějte měření na silném větru, v klimatizovaných prostorách s prouděním vzduchu. Neměřte za silného větru nebo v klimatizovaných místnostech se zapnutou klimatizací. Nepoužívejte bezprostředně po dezinfekci rukou nebo v místnostech s dezinfekčními výpary.

Některé faktory mohou také ovlivnit výsledky měření (silně znečištěné prostředí, kouření, různé plynové výpary, vítr, klimatizace, výpary alkoholu z dezinfekčních prostředků), v důsledku čehož dechový analyzátor předkládá pouze orientační výsledky. Výrobce, dovozce a prodejce odmítají odpovědnost za správnost zobrazeného výsledku a případné škody způsobené nesprávným použitím alkohol testeru. Zařízení podle českého práva nemůže být použito jako důkazní alkohol tester.

OBEČNÝ POSTUP:

Vážený zákazník, blahoželáme vám k vášmu výberu! Kvalitné spracovanie, malé rozmery, presnosť merania a nízka cena sú hlavnými prednosťami tohto zariadenia.

ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA:

	0,000‰ < ROZSAH > 4,000‰
	PRESNOSŤ <-0,06‰> +0,06‰ 0,44‰ 0,50‰ 0,56‰
	Dalšie funkcie: • podsvietenie náustku • pamäť posledného merania • upozornenie na nutnosť kalibrácie • ochrana proti nespoľahlivému meraniu

UPOZORNENIE! NEŽ ZAČNETE MERAŤ!


Po požití alkoholu si vypláchnite ústa a počkajte 30 minút. To je čas potrebný na to, aby sa alkohol vstrebával do krvi a jeho výpary v ústach a slinách sa znížili. Pre správne meranie aspoň 30 minút pred meraním nejezte, nepite a nefajčite. Nevykonávajte meranie pri silnom vetre, v klimatizovaných priestoroch s prúdením vzduchu. Nepoužívajte zariadenie bezprostredne po dezinfekcii rúk alebo v miestnostiach s výparmi z dezinfekčných prostriedkov.

Niektoré faktory môžu ovplyvniť výsledky merania (silne znečistené prostredie, fajčenie, rôzne plynové výpary, vietor, klimatizácia, výpary alkoholu z dezinfekčných prostriedkov), čo spôsobí, že výsledok alkohol testera bude len orientačný. Výrobca, dovozca a predajca odmietajú zodpovednosť za presnosť zobrazeného výsledku a prípadné škody spôsobené nesprávnym použitím alkohol testera. Zariadenie podľa slovenského práva nemôže byť použité ako dôkazný alkohol tester.

VŠEOBECNÝ POSTUP:




PŘÍPRAVA ZAŘÍZENÍ

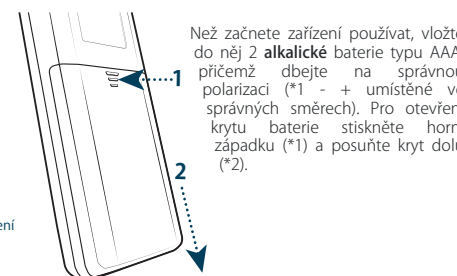


Než začnete zařízení používat, vložte do něj 2 alkalické baterie typu AAA, přičemž dbejte na správnou polarizaci (*1 - + umístěné ve správných směrech). Pro otevření krytu baterie stiskněte horní západku (*1) a posuňte kryt dolů (*2).

KROK 1.

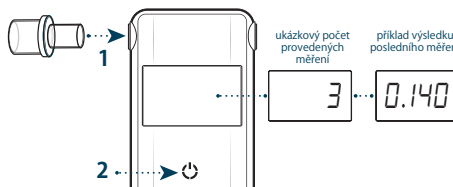


Vložte náustek do měřicího otvoru (*1), poté zapněte zařízení stisknutím tlačítka zapnutí (*2). Po spuštění uslyšíte jednorázový zvukový signál a na displeji se zobrazí počet měření od poslední kalibrace.

KROK 2.

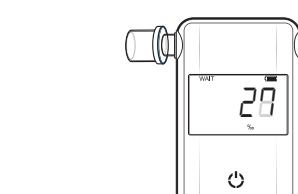

Zařízení se připravuje k provedení měření, odpočítává od 30 do 0.


KROK 3.

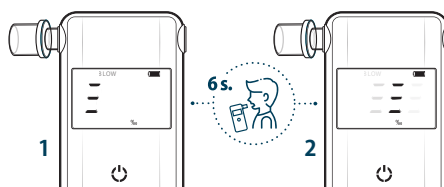

Alkohol tester je připraven k měření. Zhluboka se nadechněte a foukejte do náustku po dobu asi 6 sekund. Během odběru vzorku zařízení vydává jednotný zvukový signál a na displeji se budou pohybovat čárky. Displej bude také blikat. Foukejte, dokud zní zvuk (*2).


Alkohol tester se automaticky vypne po cca 3 minutách nečinnosti.

KROK 4.

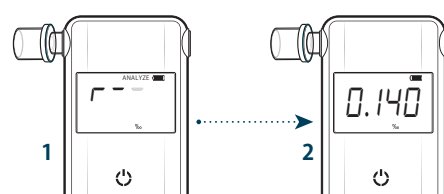


(*1) Alkohol tester analyzuje odebraný vzorek. Po analyzování vzorku zařízení zobrazí výsledek (*2). Po cca 2 minutách se tester automaticky vypne.

TEST ÚROVNĚ BATERIE

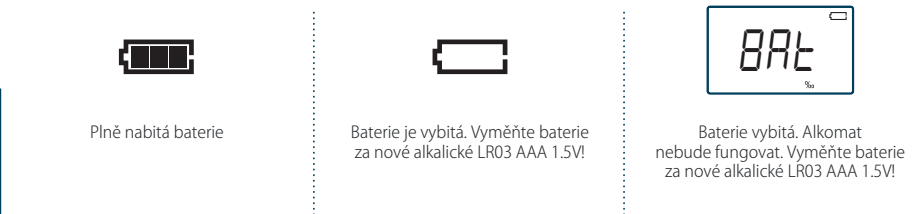


VYKONÁVANIE MERANIA

KROK 1.

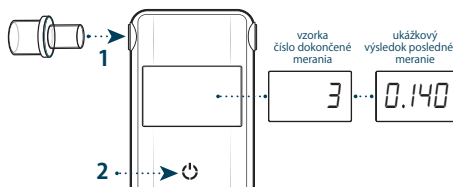


Vložte náustok do meracieho otvoru (*1), potom zapnite zariadenie stlačením tlačidla zapnutia (*2). Po spustení budete počuť jednorázový zvukový signál a na displeji sa zobrazí počet meraní od poslednej kalibrácie.

KROK 2.

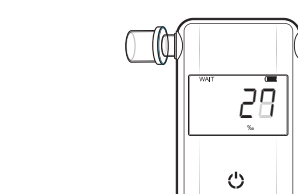

Zariadenie sa pripravuje na vykonanie merania, odpočítava od 30 do 0.


KROK 3.

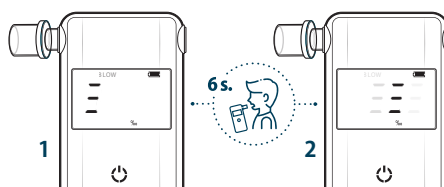

(*1) Alkohol tester je pripravený na meranie. Zhlbok a nadýchnite a fúkajte do náustku po dobu približne 6 sekúnd. Počas odberu vzorky zariadenie vydáva jednotný zvukový signál a na displeji sa budú pohybovať čiarky. Displej bude tiež blikat. Fúkajte, kým znie zvuk.


Alkohol tester sa automaticky vypne po cca 3 minútach nečinnosti.

KROK 4.

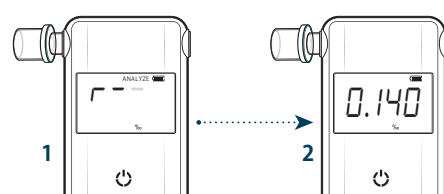

(*1) Alkohol tester analyzuje odobratú vzorku. Po analyzovaní vzorky zariadenie zobrazí výsledok. Po cca 2 minútach sa alkohol tester automaticky vypne.

TEST ÚROVNĚ BATÉRIE

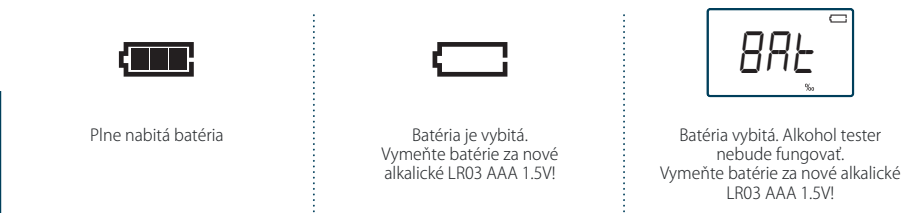


	Chyba průtoku vzduchu. Měření bylo provedeno příliš krátce nebo výdech byl příliš slabý. Po vyčištění se alkohol tester připraví na další měření. Měření proveďte foukáním plynule. Nefoukejte příliš silně ani příliš pomalu/náhle.
	Do 3 minut od zahájení měření nebyl dodán vzorek vzduchu. Alkohol tester se vypne.
	Žádná reakce zařízení. Alkohol tester se vypne.
	Příliš nízká okolní teplota. Proveďte měření znovu po dosažení provozní teploty senzoru.
	Systém chráníci před nesprávným měřením. Je nutné provést kalibraci. Kontaktujte servis.
	Zařízení provedlo 500 měření. Je nutná kalibrace senzoru. Kontaktujte servis.

SKLADOVÁNÍ A OBECNÉ POZNÁMKY					
	30 minut před měřením nejzte, nepijte a nekuřte.		Skladujte na suchém místě, nevystavujte přímému slunečnímu záření a teplotám mimo rozmezí 5 až 40 °C. Neskladujte v autě!		Přístroj nedezinfikujte ani nečistěte alkoholem nebo jinými dezinfekčními prostředky. Nefoukejte do dechového analyzátoru bezprostředně po použití dezinfekčních prostředků na ruce.
	Nemějte bezprostředně po požití alkoholu. Foukání do alkoholtesteru bezprostředně po požití alkoholu může poškodit senzor a způsobit nepřesné měření.		Nemějte v blízkosti těkavých látek nebo jejich výparů, které mohou zkreslit výsledek měření. Dechový analyzátor není určen k měření alkoholu v kapalných parách. Přístroj nečistěte čisticími prostředky.		Přístroj pravidelně servisujte, aby nedošlo k jeho poškození a poruchám. Nevystavujte dechový analyzátor pádům a nárazům. Dodržujte podmínky skladování, aby byla zachována dlouhá životnost a správná funkce.
				POZNÁMKA: Platí pro nákup prvním uživatelem.	

	Chyba prúdenia vzduchu. Meranie bolo vykonané príliš krátko alebo bol výdech príliš slabý. Po vyčistení sa alkohol tester pripraví na ďalšie meranie. Meranie vykonajte fúkaním plynule. Nefúkajte príliš silno ani príliš pomaly/náhle.
	Do 3 minút od začiatku merania nebol dodaný vzduch. Alkohol tester sa vypne.
	Žiadna reakcia zariadenia. Alkohol tester sa vypne.
	Príliš nízka okolitá teplota. Vykonajte meranie znovu po dosiahnutí prevádzkovej teploty senzora.
	Systém chrániaci pred nesprávnym meraním. Je nutné vykonať kalibráciu. Kontaktujte servis.
	Zariadenie vykonalo 500 meraní. Je nutná kalibrácia senzora. Kontaktujte servis.

SKLADOVANIE A VŠEOBECNÉ POZNÁMKY					
	30 minút pred meraním nejedzte, nepite a nefajčite.		Skladujte na suchom mieste, nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a teplotám mimo rozsah 5 až 40 °C. Neskladujte v aute!		Přístroj nedezinfikujte ani nečistěte alkoholem nebo jinými dezinfekčními prostředky. Nefúkajte do zariadenia bezprostredne po použití dezinfekcie na ruky.
	Nemerajte bezprostredne po konzumácii alkoholu. Fúkanie do dychového analyzátoru bezprostredne po požití alkoholu môže poškodiť senzor a spôsobiť nepresné merania.		Nemerať v blízkosti prchavých látok alebo ich výparov, ktoré môžu skresliť výsledky merania. Dechový analyzátor nie je určený na meranie alkoholu v kvapalných parách. Přístroj nečistěte čisticími prostředky.		Přístroj pravidelně servisujte, aby nedošlo k jeho poškození a poruchám. Nevystavujte zariadenie pádom a nárazom. Dodržujte podmienky skladovania, aby sa zachovala dlhá životnosť a správna funkcia.
				POZNÁMKA: Platí pre nákup prvným užívateľom.	

KALIBRACE	
	
Upozornění: Kalibrace tohoto alkohol testeru je po dobu 12 měsíců od zakoupení ZDARMA v sídle Work and Road Safety Corporation s.r.o. / Alkozona.cz a dalších autorizovaných servisních místech. Více informací najdete v záručním listě a na stránce alkohol testerů alkoholtestery-prox.cz	

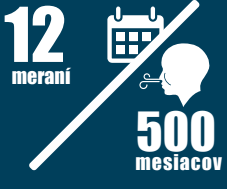KALIBRÁCIA	
	
Upozornenie: Kalibrácia tohto alkohol testera je počas 12 mesiacov od zakúpenia ZDARMA v sídle Work and Road Safety Corporation s.r.o. / Alkozona.cz a v ďalších autorizovaných servisných miestach. Viac informácií nájdete v záručnom liste a na stránke alkohol testerov alkoholtestery-prox.cz.	

PŘEČTĚTE SI PŘED ODESLÁNÍM ZAŘÍZENÍ DO SERVISU:	
Pokud máte dojem, že váš alkohol tester nefunguje správně, před odesláním do servisu ověřte následující: - Používání starých nebo nekvalitních baterií může ovlivnit přesnost měření. Používejte pouze alkalické baterie vysoké kvality. Nepoužívejte nabíjecí baterie! Dekalibrace alkohol testeru. Alkohol tester by měl být kalibrován podle specifikace. Prvních 12 měsíců nebo 500 měření od nákupu je kalibrace zařízení ZDARMA! Více informací najdete na stránce alkoholtestery-prox.cz - Každý člověk má jinou schopnost metabolizovat alkohol a tato schopnost se může měnit v závislosti na mnoha faktorech. Proto, pokud váš alkohol tester PRO X-3 po kalibraci ukazuje hodnoty, které neodpovídají vašim očekáváním, přečtěte si návod a proveďte testy znovu s intervaly, jak je uvedeno v návodu. Nejvyšší hodnota bude správná. Více informací o faktorech ovlivňujících výsledky měření alkohol testeru najdete na stránce: alkoholtestery-prox.cz	

CENTRÁLA PRAHA Work and Road Safety Corporation s.r.o. Kolbenova 610/26 190 00 – Praha 9 info@warscorp.cz	
	U P O Z O R N Ě N Í Symbol přeškrtnutého koše znamená, že tento produkt, jako elektronický odpad, musí být odstraněn mimo běžný domácí odpad v souladu s místními předpisy o nakládání s elektroodpadem. Správná likvidace a recyklace pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.
Vyrobeno v KOREI	
PRED ODOSLANÍM ZARIADENIA DO SERVISU SI PREČÍTAJTE:	

Pokiaľ máte dojem, že váš alkohol tester nefunguje správne, pred odoslaním do servisu overte nasledujúce: - Používanie starých alebo nekvalitných batérií môže ovplyvniť presnosť merania. Používajte len alkalické batérie vysokej kvality. Nepoužívajte nabíjateľné batérie! Dekalibrácia alkohol testera. Alkohol tester by mal byť kalibrovaný podľa špecifikácie. Prvých 12 mesiacov alebo 500 meraní od nákupu je kalibrácia zariadenia ZDARMA! Viac informácií nájdete na stránke alkoholtestery-prox.cz. - Každý človek má inú schopnosť metabolizovať alkohol a táto schopnosť sa môže meniť v závislosti na mnohých faktoroch. Preto, ak váš alkohol tester PRO X-3 po kalibrácii ukazuje hodnoty, ktoré nezodpovedajú vašim očakávaniam, prečítajte si návod a vykonajte testy znovu s intervalmi, ako je uvedené v návode. Najvyššia hodnota bude správna. Viac informácií o faktoroch ovplyvňujúcich výsledky merania alkohol testera nájdete na stránke alkoholtestery-prox.cz.	
---	--

CENTRÁLA PRAHA Work and Road Safety Corporation s.r.o. Kolbenova 610/26 190 00 – Praha 9 info@warscorp.cz	
	U P O Z O R N E N I E Symbol přeškrtnutého koše znamená, že tento produkt, ako elektronický odpad, musí byť odstránený mimo bežný domový odpad v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s elektroodpadom. Správna likvidácia a recyklácia pomáha predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.
Vyrobeno v KOREI	