

# Be Lucent Stellar Gentle Teeth Whitening Kit

*Stručný návod k použití / Stručný návod na použitie*

---

## CZ - Jak používat

- 1 Vyčistěte zuby a osušte je ubrouskem nebo ručníkem.
- 2 Otáčejte spodní částí aplikátoru, dokud se gel nedostane do štětečku. Naneste silnější vrstvu gelu na přední plochy zubů. Vyhněte se dásním.
- 3 Vložte náustek s aktivátorem do úst a jemně skousněte. Stisknutím tlačítka aktivujte světlo.
- 4 Nechte aktivátor působit 20 minut. Po 20 minutách se automaticky vypne.
- 5 Vyjměte aktivátor a vypláchněte ústa vodou. Náustek opláchněte pod tekoucí vodou.
- 6 Ošetření opakujte přibližně 7 dní; podle požadovaného výsledku může být potřeba několik dalších dní.

### Upozornění:

Nepoužívejte na poškozené zuby. Výrobce nedoporučuje používání dětem do 16 let, těhotným a kojícím ženám. Při podráždění nebo otoku dásní používání přerušte a kontaktujte zubního lékaře.

---

## SK - Ako používať

- 1 Zuby si vyčistite a osušte obrúskom alebo uterákom.
- 2 Otáčajte spodnou časťou aplikátora, kým sa gél nedostane do štetca. Naneste hrubšiu vrstvu gélu na predné plochy zubov. Vyhnite sa ďasnám.
- 3 Vložte náustok s aktivátorom do úst a jemne zahryznite. Stlačením tlačidla aktivujte svetlo.
- 4 Nechajte aktivátor pôsobiť 20 minút. Po 20 minútach sa automaticky vypne.
- 5 Vyberte aktivátor a vypláchnite ústa vodou. Náustok opláchnite pod tečúcou vodou.
- 6 Ošetrovanie opakujte približne 7 dní; podľa požadovaného výsledku môže byť potrebných niekoľko ďalších dní.

### Upozornenie:

Nepoužívajte na poškodené zuby. Výrobca neodporúča používanie deťmi do 16 rokov, tehotnými a dojčiacimi ženami. Pri podráždení alebo opuchu ďasien používanie prerušte a kontaktujte zubného lekára.

*Poznámka: Tyto informace slouží jako stručný návod k použití produktu. Před prvním použitím doporučujeme seznámit se s úplnými pokyny výrobce a dodržovat uvedená upozornění.*

*Poznámka: Tieto informácie slúžia ako stručný návod na použitie produktu. Pred prvým použitím odporúčame oboznámiť sa s úplnými pokynmi výrobcu a dodržiavať uvedené upozornenia.*